

PANTY GAINE


mesures obligatoires

*circonférences prises **debout sans serrer** avec un mètre ruban sur la peau (ou sur un vêtement léger non compressif)


*les éventrations et hernies **réductibles** doivent être comprimées lors de la mesure

* préciser en spécificité si technique de prise de mesure différente (assis, couché...)


exemple de formulaire avec valeurs saisies (rouge)

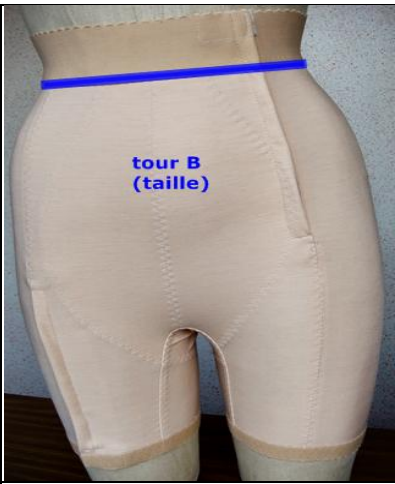



B = 130 cm

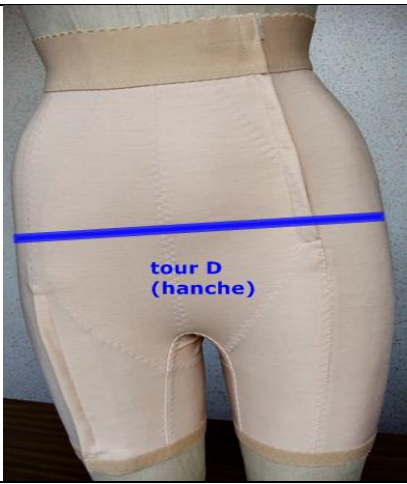


D = 165 cm

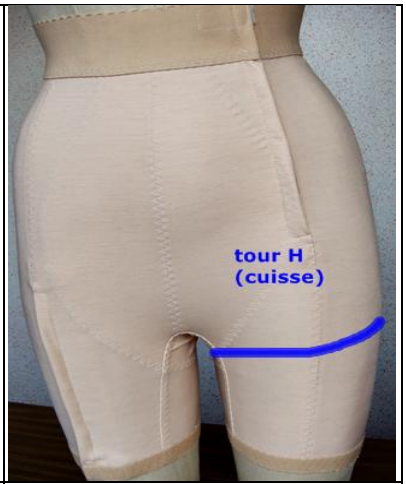

H=61droit/62gauche

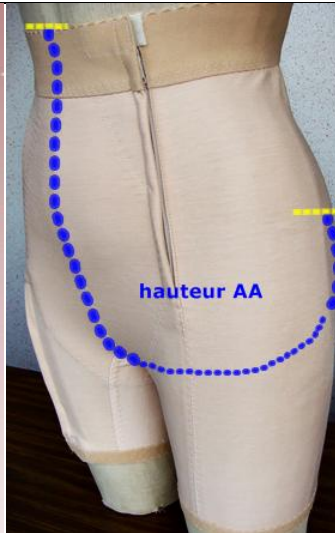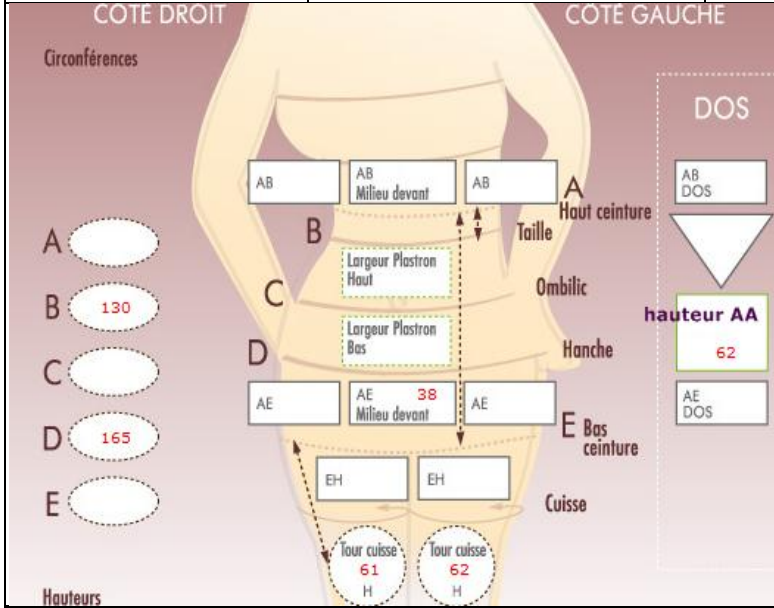


AA = 62 cm

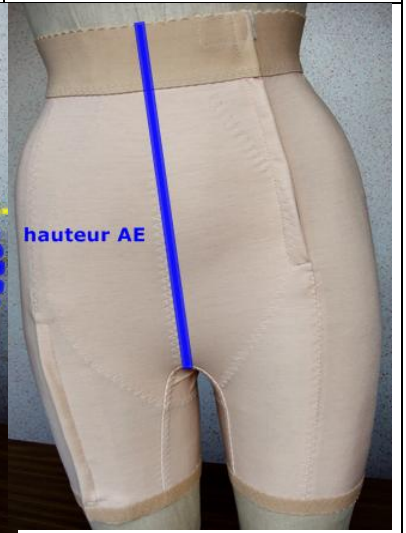

AE = 38 cm

voir fiche GAINE pour description prise de mesure AA et AE

mesures facultatives

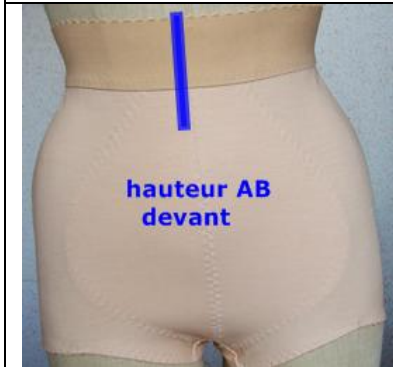

hauteur AB devant




tour A haut

"plastron en forme " pour ventre bombé ou tablier




tour C ombilic

mesure à renseigner en cas de ventre bombé

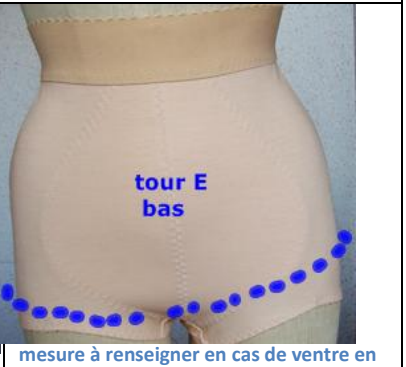

tour E bas

mesure à renseigner en cas de ventre en tablier (tombant)

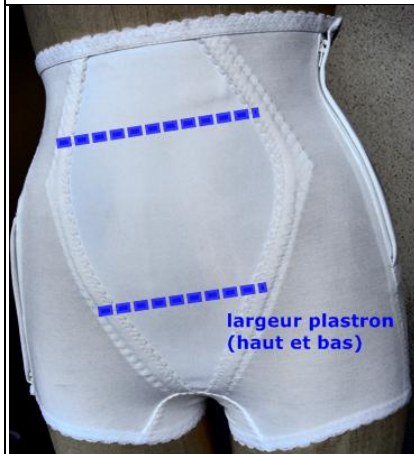


largeur plastron (haut et bas)




hauteur EH

"plastron losange" pour ventre plat ou légèrement bombé (ne pas sélectionner ventre bombé)

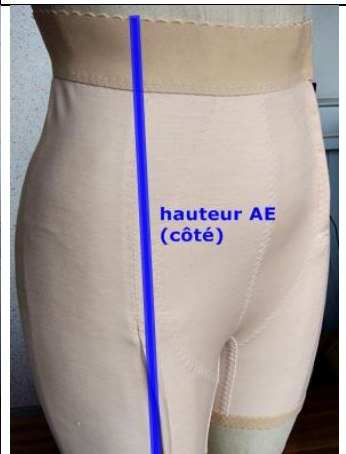

hauteur AE (côté)

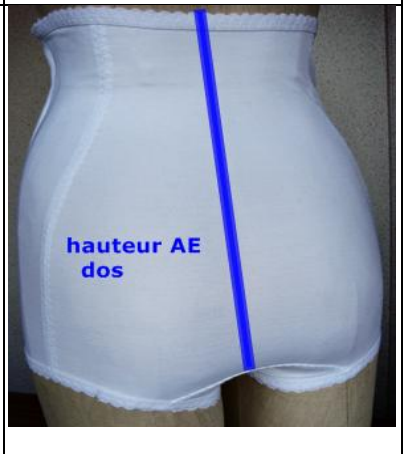

hauteur AE dos