

BODY ouvert

mesures obligatoires

*circonférences prises **debout sans serrer** avec un mètre ruban sur la peau (ou sur un vêtement léger non compressif)
 *circonférences **F et G** mesurées sur soutien gorge
 *les éventrations et hernies **réductibles** doivent être comprimés lors de la mesure
 *préciser en spécificité si technique de prise de mesure différente (assis, couché...)

exemple de formulaire avec valeurs saisies (rouge)




F = 95 cm

G = 84 cm

B = 103 cm

D = 97 cm

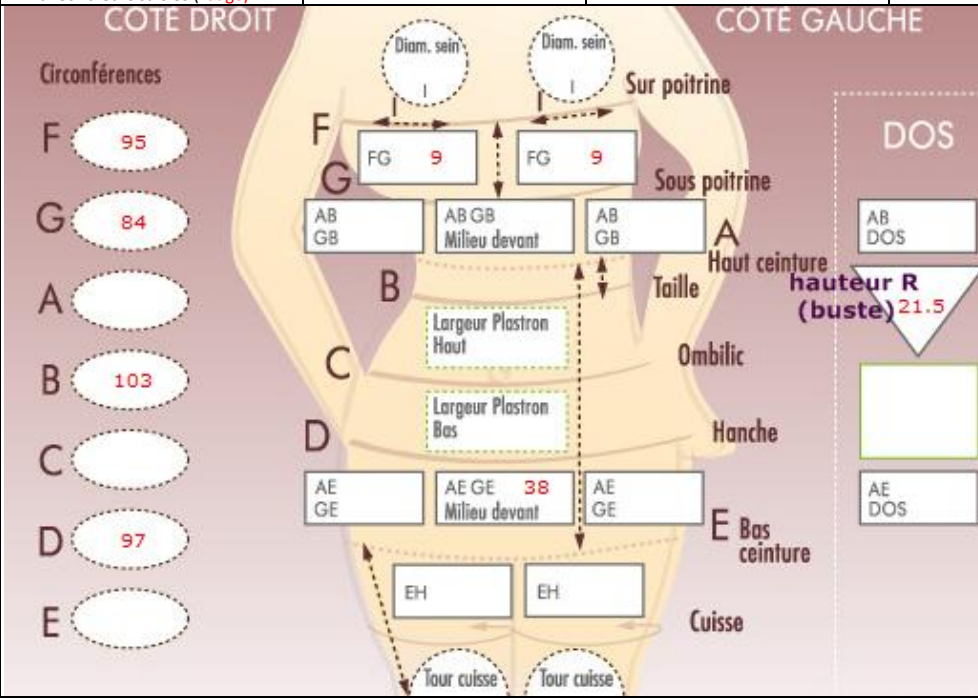

GE = 38cm (sous poitrine à bas produit)

mesures facultatives



R = 21.5 cm
(pointe mamelon à épaule)



FG = 9 cm
(pointe mamelon à bas bonnet)



largeur d'un bord à l'autre en suivant la courbure

sous poitrine jusqu'à la taille

sous axillaire jusqu'à la taille

